

# PFLEGE- UND REINIGUNGSANLEITUNG



## PFLEGE- UND REINIGUNGSANLEITUNG FÜR UNSERE BEZUGSMATERIALIEN.

Mit Ihrer Entscheidung für ein GREINER Markenprodukt haben Sie eine erstklassige Wahl getroffen – gerade auch bei Polstern und Bezugsmaterialien.

Bei regelmäßiger und dauerhafter Pflege werden diese Polsterbezüge ihre Langlebigkeit in bester Qualität nachweisen. Hygiene und Reinigung lassen sich schnell und unkompliziert umsetzen.

Hier erhalten Sie wesentliche Informationen zur Verwendung und Anwendung geeigneter Reinigungs- und Desinfektionsprodukte.

Verschmutzungen durch Öle, Fette, Tinte, Blut, Urin und organische Säuren müssen umgehend entfernt werden. Hierzu lauwarmes Wasser oder eine warme, milde Seifenlauge und ein feuchtes Microfasertuch verwenden, keine Lösungsmittel. Chloride, Poliermittel, chemische Reinigungsmittel oder Wachspolituren vermeiden. Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien sind von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen.



## Tuxor.

## compact.

### Vom Bezugshersteller empfohlene Desinfektionsmittel

Adexano	Bacoban WB 1%	✓
Antiseptica	Acrylan	✓
B. Braun Melsungen AG	Meliseptol Foam / Hexaquart plus lemon fresh / Hexaquart forte 2%	✓
Bode Chemie GmbH	Dismozon Pur / Microbac Forte / Microbac Tissues / Bacolloicid Spezial / Kohrsolin FF	✓
CosiMed GmbH	CosiMed 7,5%	✓
Dr. Schumacher	Optisept 7% / Cleansept Wipes / Cleansept 2% / Biguanid Fläche	✓
Dürr Dental GmbH & Co. KG	FD 360 undiluted	✓
Ecolab	Sani-cloth active / Incidin rapid	✓
Franken Chemie GmbH Co KG	Franko-cid N0, 25% / Dessan 2 0, 25%	✓
Metasys	Green & clean SK start	✓
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH	Lysoformin spezial 0	✓
Schülke & Mayr GmbH	Microzid sensitive Liquid / Mikrozid universal Liquid / Perform	✓
Pino	Septapin Aquaquick alkoholfrei	✓

### Vom Bezugshersteller empfohlene Desinfektionsmittel

Akzo Nobel	Natriumhypochlorid	✓
Bode Chemie GmbH	Bacillo AF / Bacillo 30 Sensitive Foam + Tissues / Cutasept / Mikrobac forte	✓
Braun	Meliseptol Foam Pure / Softasept N / Meliseptol / Helipur / Melsitt / Melsept	✓
Desomed	Desomed Rapid	✓
Dr. Schumacher	Descosept AF	✓
Ecolab	Incidin foam / Incidin Plus / Incidin perfekt / Incidin liquid	✓
Favodent Karl Huber	Flora quick	✓
Henkel	Incidur-Spray	✓
Lysoform	Fugaten Spray	✓
Orochemie	B45	✓
Peppler	Micro clean / Pepp clean	✓
Reckitt Benckiser	Sagrotan med	✓
Ruck	Sprühdesinfektion	✓
Schülke & Mayr	Kodan Tinktur Forte / Esemfix / Octenisept / Mikrozid AF	✓
Unident	Unisepta foam	✓

# electra.



Vom Bezugshersteller empfohlene Desinfektionsmittel		
Adexano	Bacoban WB 1%	✓
Antiseptica	Acrylan	✓
B. Braun Melsungen AG	Meliseptol Foam / Hexaquart plus lemon fresh / Hexaquart forte 2%	✓
Bode Chemie GmbH	Dismozon Pur / Microbac Forte / Microbac Tissues / Bacolloicid Spezial / Kohrsolin FF	✓
CosiMed GmbH	CosiMed 7,5%	✓
Dr. Schumacher	Optisept 7% / Cleansept Wipes / Cleansept 2% / Biguanid Fläche	✓
Dürr Dental GmbH & Co. KG	FD 360 undiluted	✓
Ecolab	Sani-cloth active / Incidin rapid	✓
Franken Chemie GmbH Co KG	Franko-cid N0, 25% / Dessan 2 0, 25%	✓
Metasys	Green & clean SK start	✓
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH	Lysoformin spezial 0	✓
Schülke & Mayr GmbH	Microzid sensitive Liquid / Mikrozid universal Liquid / Perform	✓
Pino	Septapin Aquaquick alkoholfreie	✓

Getestet wurde die höchste empfohlene Konzentration in jeweils 50 Anwendungen. Die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels muss in allen Fällen beachtet werden. Eine Beeinträchtigung des Materials ist bei Langzeitgebrauch nicht ausgeschlossen.

Der Wechsel von Desinfektionsmitteln, besonders bei Anwendungen eines Mittels über einen längeren Zeitraum, sollte vermieden werden, da ansonsten Produktschädigungen nicht auszuschließen sind. Bei regelmäßigem Einsatz von alkohol- bzw. lösemittelhaltigen Erzeugnissen kann eine negative Beeinflussung der lackierten Oberfläche sowie eine langfristige Materialversprödung eintreten.

Da wir auf die Herstellung und die Rohstoffe für die Desinfektionsmittelproduktion keinen Einfluss nehmen können, sind Garantieleistungen auf eingeschränkte Desinfektionsmittelbeständigkeit ausgeschlossen.

Lacke, aggressive oder chemische Reinigungs- und Waschmittel, xylolhaltige Flüssigkeiten, Aceton oder MEK verursachen sofortigen Schaden und tragen zu einer Materialermüdung bei. Der Gebrauch solcher Mittel erfolgt auf eigene Verantwortung des Benutzers. Wir empfehlen vor der Anwendung eines Desinfektionsmittels an einer nicht sichtbaren Stelle des Bezuges eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

GREINER haftet weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung/Verfärbung.



## CARISMA

**Die richtige Pflege von Anfang an.**

Neben Desinfektion und Reinigung unserer Produkte ist die richtige Pflege besonders wichtig, um ihre Langlebigkeit und ästhetische Ausstrahlung zu erhalten.

Genau dafür empfehlen wir Ihnen die Verwendung unserer **CARISMA Reinigungs- & Pflege-Lotion** sowie unser spezielles **Pflege-Set** mit dem wiederverwendbaren **Hochflortuch**. Damit unterstützen Sie nicht nur die Werterhaltung Ihrer Produkte, sondern sorgen auch für ein angenehmes und hygienisches Umfeld.

**Das Ergebnis:** Ihre Polster behalten ihren Glanz und ihre Ausstrahlung trotz starker Beanspruchung.

# GREINER

GREINER GmbH  
Wettestraße 1 · 74385 Pleidelsheim · Germany  
T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99  
info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de